 <p>Secretaria de Saúde GOVERNO DO ESTADO <b>PERNAMBUCO</b> MAIS TRABALHO, MAIS FUTURO.</p>	<b>PROTOCOLOS OPERACIONAIS PADRÃO HOSPITAL GERAL EDUARDO CAMPOS SERRA TALHADA - PE</b>
<b>Código:</b> POP	<b>Protocolo:</b> NORMAS E ROTINAS DE LIMPEZA DE
<b>Emissão:</b> 16/10/2020 – v. 1.0	<b>RESERVATÓRIO DE ÁGUA PARA HEMODIÁLISE</b>
<b>Próxima revisão:</b> 08/2021	<b>Responsável:</b> João de Cadete Batista Neto

## 1. OBJETIVO

Implantar as normas e rotinas de higienização do reservatório de água destinada para hemodiálise.

## 2. CAMPO DE APLICAÇÃO

Setor responsável pela água da hemodiálise do Hospital Eduardo Campos;

## 3. EXECUTANTES

**Setor de Saúde:** Estabelece critérios, orienta e verifica o cumprimento das ações;

**Coordenação de Manutenção:** Executa e monitora os procedimentos de higienização de reservatórios e preenche registro de controle deste procedimento;

## 4. PERIODICIDADE:


Caixa d'água de uso para hemodiálise: Semestral.

## 5. RECURSOS NECESSÁRIOS:


- EPI'S
- Balde, escova, pano limpo, hipoclorito de sódio 2,0%;
- Planilha de controle das ações.

## 6. PROCEDIMENTO

- Esvaziar grande parte do volume de água da caixa d'água;
- Quando a caixa estiver quase vazia, fechar a saída de água e utilizar a água que restou para limpeza;
- Esfregar as paredes e o fundo da caixa com escova. Não necessita utilizar sabão ou outro produto;
- Retirar a água suja que sobrou da limpeza usando baldes e panos, deixando a caixa totalmente limpa;

	<b>PROTOCOLOS OPERACIONAIS PADRÃO HOSPITAL GERAL EDUARDO CAMPOS SERRA TALHADA - PE</b>
<b>Código:</b> POP	<b>Protocolo:</b> NORMAS E ROTINAS DE LIMPEZA DE
<b>Emissão:</b> 16/10/2020 – v. 1.0	<b>RESERVATÓRIO DE ÁGUA PARA HEMODIÁLISE</b>
<b>Próxima revisão:</b> 08/2021	<b>Responsável:</b> João de Cadete Batista Neto

- Tampar a caixa;
- Aguardar 02 horas para desinfecção da caixa;
- Logo após, encher a caixa novamente;
- Registrar a data e o responsável pela da limpeza.

 <p>Secretaria de Saúde GOVERNO DO ESTADO <b>PERNAMBUCO</b> MAIS TRABALHO, MAIS FUTURO.</p>	<b>PROTOCOLOS OPERACIONAIS PADRÃO HOSPITAL GERAL EDUARDO CAMPOS SERRA TALHADA - PE</b>
<b>Código:</b> POP	<b>Protocolo:</b> NORMAS E ROTINAS DE LIMPEZA DE
<b>Emissão:</b> 16/10/2020 – v. 1.0	<b>RESERVATÓRIO DE ÁGUA PARA HEMODIÁLISE</b>
<b>Próxima revisão:</b> 08/2021	<b>Responsável:</b> João de Cadete Batista Neto

## REREFÊNCIAS

BRASIL. Portaria nº 2914 de 12/12/2011. Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade. Brasília: Ministério da Saúde, 2011.

<https://portal.ifrn.edu.br/atividades-estudantis/saude/manual-de-boas-praticas-dos-servicos-de-saude-do-ifrn/procedimentos-operacionais-padrao/pop-13>

Responsável:

Revisado:

Revisado:

Autorizado:

--	--	--	--